

Angelcare®

ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ

Наръчник на потребителя

Дигитален бебешки монитор за движение и звук със сензорен екран (тъчскрийн).

Модел AC701



Не
Забравяйте

Важни съвети за първоначална инсталация



Индикатор за движение

Устройството е с предварително активирана аларма за движение. Когато го включите, алармата ще се включи ако не е засечено движение, без значение дали сензорната подложка е включена или не. Изключете тази опция, за да можете да ползвате устройството без сензорна подложка.



Батерии

Поставете презареждащите батерии в Родителският уред. Ако ги поставите неправилно, Родителският уред няма да се зарежда когато е поставен на зареждащата подложка. Индикатора за батерии ще присвятка за кратко когато се зарежда.



Безопасност

Подсигурете се че детският уред е на поне 1 метър от бебешкото легло. Кабела на сензорната подложка трябва да е подсигурен с предпазителите включени в комплекта.

Моля следвайте внимателно инструкциите за правилна инсталация.

Моля НЕ връщайте продукта обратно в магазина. В случай на нужда, обърнете се към представителя на Angelcare за България. Контакт за връзка: 02-9424636 или office@bebelan.bg