

<b>▲ ВНИМАНИЕ</b> .....	3
АС701 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ .....	8
СТЪПКА 1 – Зареждане на Приемника (15 часа) .....	9
СТЪПКА 2 – Поставяне на Сензорна подложка .....	10
СТЪПКА 3 – Поставяне на Предавателя .....	13
СТЪПКА 4 – Включване на Монитора .....	14
СТЪПКА 5 – Тестване и запознаване с монитора .....	15
СТЪПКА 6 – Включване и изключване на Допълнителни функции .....	19
Отстраняване на проблеми .....	25
Технически спецификации .....	27

## НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

инструкциите за безопасност и ползване трябва да бъдат пазени ако се наложи справка в бъдеще

Всички инструкции за безопасност трябва да бъдат прочетени преди използването на продукта

Несъобразение със инструкциите и предупрежденията може да доведе до сериозна повреда на продукта или наранявания

Сензорната подложка не е предназначена да се използва с възрастни, деца или новородени над 24 месеца.

Сензорната подложка не е предназначена да засича дали детето е извън леглото.

## ▲ ВНИМАНИЕ

Необходимо е да се слабя от възрастен  
Пазете малките части далеч от досега на деца.

Моля НЕ връщайте продукта обратно в магазина. В случай на нужда, потърсете представителя на Angelscare за България. Контакт за връзка: 029424636 или на office@bebelan.bg

За допълнителни въпроси или ако искате да свалите оригиналния ръчник,  
посетете: [www.angelscare.co.uk](http://www.angelscare.co.uk).

## ▲ ВНИМАНИЕ

1. Този продукт не замества директното наблюдаване на Вашето бебе. Проверявайте активността на детето на равни интервали от време. Наблюдението на преждвременно родените или на тези, които са заплашени от някакъв риск, трябва да се извършва единствено чрез помощта на лекар или друг здравен професионалист. Този продукт не е медицинско устройство или уред, който да предотвратява случаи на Синдрома на внезапната смъртност при новородените (SIDS)
2. **ВНИМАНИЕ** – опасност от задушаване. Деца са се задушавали кабелите. Дръжте кабелите на адаптера далеч от досега на деца. (на повече от 1м.) Не използвайте сензорната подложка без предпазителите за кабели. Ако предпазителите са счупени или повредени веднага прекратете използването на сензорната подложка.



8. Дръжте устройството далеч от узоочници на топлина (като котлон, радиатор и т.н.)

9. **Винаги** поставяйте и двата уреда на равна повърхност в изправено положение Подсигурете място за вентилация. НЕ поставяйте на дивани, възглавници и легла, защото може да блокира вентилацията.

10. Този уред ползва обществени честоти за предаване на сигнала. Възможно е улавяне на други сигнали или смущения от Вашата сграда. Сигнала от Вашия предавател също може да бъде уловен от други домакинства. За да го предотвратите, уверете се, че и двата уреда са изключени на позиция „OFF“, когато не са ви необходими.

11. Устройството не е играчка! Не позволявайте на деца да си играят с него.

12. Този продукт съдържа малки частици. Необходимо е слабяне от възрастен. Внимателно разопаковайте и слобете устройството, като държите малките части далеч от досега на деца.

13. Когато ползвате устройството, температурата в стаята трябва да е между 10° и 40°С

## ▲ ВНИМАНИЕ ЗА БАТЕРИИТЕ

14. Използвайте само AAA презаредими батерии за приемника. НЕ смесвайте стари и нови батерии НЕ смесвайте алкални, нормални или презаредими батерии. Поставяйте батерии с правилната поларност. Използвайте САМО препоръчаните батерии или подобни по заряд и размер, и правилния адаптер.

Премахнете батериите, когато не ползвате устройството, за дълъг период от време или когато са изтощени. Изхвърлете изтощените батерии. Не се опитвайте да презаредите не-презарядими батерии. Дръжте всички батерии далеч от деца.

#### 15. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

15.1 **Прочетете тези инструкции** – Всички инструкции за безопасност трябва да бъдат прочетени преди използването на продукта

15.2 **Пазете инструкциите** – инструкциите за безопасност и ползване трябва да бъдат пазени ако се наложи справка в бъдеще

15.3 **Спазвайте правилата** – Всички правила от инструкциите трябва да бъдат спазвани

15.4 **Вода и влага** – НЕ използвайте монитора в близост до вода. На пример в близост до вана, мивка, пералня, в мокра среда или в близост до плувен байсен или други водни басейни. Трябва да поставяте Вашият Angelcare монитор и сензорните подложки така, че да не ги застрашават падащи предмети или заливане с течности.

15.5 **Почистване** – Изключете всички части преди да ги почиствате. НЕ потапяйте във вода нито един от уредите. Почиствайте само със сух плат.

15.6 **Вентилация** – НЕ блокирайте отворите за вентилация. Осигурете място за вентилация, когато уредите са в употреба. НЕ покривайте родителският или детският уред.

15.7 **Източници на топлина** – НЕ поставяйте Вашият Angelcare монитор в близост до източници на топлина като радиатор, печки, телевизори, или други уреди, които излъчват топлина. Топлината може да повреди външното покритие.

15.8 **Предпазване на кабелите:** Пазете от повреди кабелите на сензорните подложки. Кабелът между уреда и сензорните подложки е достатъчно дълъг, за да го прекратите по такъв начин, че да не се стълва върху него, да не се преплъват и да не наранявате, като поставяте други предмети върху него.

15.9 **Допълнителни аксесоари** – Използвайте продукта само с аксесоари препоръчани от дистрибутора или продадени в комплект със самия продукт. НЕ поставяйте продукта на нестабилни повърхности, тъй като той може да падне и да причини вреда на детето Ви или на Вас. Всяко поставяне на продукта трябва да бъде според инструкциите на производителя.

15.10 **Когато не използвате Angelcare® монитор** за по-дълго време, махайте батериите и от двата уреда и изключвайте от електрическата мрежа.

15.11 **Поддръжка** – НЕ предприемайте самостоятелна поддръжка на продукта, тъй като отваряне или премахване на външната обвивка може да ви изложи на високо напрежение.

15.12 **Резервни части** – Бъдете сигурни, че когато сменяте части на уредите, резервните части са същия размер като оригиналните. Друга замяна може да доведе до пожар, токов удар или други опасности

15.13 **Употреба** – този уред е предназначен да бъде използван като помощен уред на родителя. Той не е предназначен да замести постоянна родителска грижа и не трябва да се използва като такъв. Моля използвайте уреда както е посочено в упътването.

15.14 **Захранване** – Използвайте само адаптерите приложени в комплекта на Angelcare

15.15 **Претоварване** – Не претоварвайте стенните контакти, удължителите или интегралните розетки, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар.

15.16 **Не насилвайте други предмети** в отворите на монитора или сензорната подложка, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар. Също така не разсипвайте течности в отворите.

15.17 **Антенна** – Антената, използвана за този продукт, трябва да бъде инсталирана, така че да бъде на не повече от 20cm разстояние от хора и не трябва да функционира с други антени или предаватели.

15.18 **ВНИМАНИЕ** Опасност от удушаване — деца са се задужавали в кабелите. Дръжте кабелите на адаптера далеч от досега на деца (на поне 1 метър). Не използвайте сензорната подложка без препазителите за кабели. Ако препазителите са счупени, прекратете употребата на сензорната подложка.



15.19 **Angelcare® монитор** ползва обществени честоти за предаване на сигнала. Възможно е улавяне на други сигнали или смущения от Вашата сграда. Сигнала от Вашия предавател също може да бъде уловен от други домакинства. За да двата уреда са изключени на позиция „OFF“, когато не са ви необходими.

15.20 **Източници на вибрация** – Когато ползвате монитора, не използвайте електронни уреди в близост до леглото, защото могат да смутят сигнала или да възпроизведат вибрации. Това може да попречи на работата на вашия монитор и алармата няма да звучи, ако продължи да засича други движения.

Може да чуете фалшива аларма поради няколко причини. Например ако не сте изключили предавателя след като сте извадили детето от леглото, или ако не сте поставили сензорната подложка правилно.

Уверете се че сензорната подложка е на твърда и стабилна плоскост с лицето нагоре. Може да трябва да се регулира нивото на чувствителност, показано в стъпка 5.1. Винаги бъдете в готовност да проверите детето Ви, когато се активира алама.

15.21 **Сензорната подложка** – Ако кошарата има пружина или меко дъно, поставете твърда плоскост между дъното на кошарата и сензорната подложка. Плоскостта трябва да е с размери 33x33cm и 6mm дебелина. Използвайте сензорната подложка само на стационарни места предназначени за спане, като кошара..

## 16. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS RELATED TO USE OF BATTERIES

- 16.1 Използвайте само размера и типа батерии, които са посочени в наръчника.
- 16.2 Използвайте само AAA презаредими батерии или AC адаптера за Приемника. Не поставяйте алкални батерии или ще увредите уреда.
- 16.3 Преди първото ползване, заредете батериите за 15 часа, като се уверите че устройството е в режим OFF. Използвайте само AC адаптера, който е в комплекта на устройството.
- 16.4 НЕ използвайте тези адаптери с никое друго устройство.
- 16.5 Когато изваждате AC адаптера от предавателя, бъдете сигурни че той е в режим OFF. В противен случай, той ще премине към режим батерии, ако са поставени такива.
- 16.6 НЕ използвайте презаредими батерии за уреда при детето. Използвайте само алкални батерии.
- 16.7 НЕ излагайте батериите на огън, защото могат да избухнат. Проверете с месните си регулации, за възможни места за изхвърляне.
- 16.8 Работете с батериите внимателно! Избягвайте да търкате батериите с всякакви електропроводими материали като гривни, пръстени или ключове. Презареждане, грешно зареждане, повреждане може да доведат до едно от следните: изпускане на токсични материали, изпускане на водород или кислород и погачване на температурата на повърхността на батерията.

16.16

16.9 Не предприемайте презареждане на батериите, които са в комплекта на продукта и не са предназначени за презареждане.

16.10 НЕ ЗАГРЯВАЙТЕ батериите в опит да ги презаредите. Възможно е батерията да потече, което може да доведе до изгаряния и по-сериозни наранявания.

16.11 Когато се наложи замяна на батериите, смяната трябва да се извърши с идентични или подобни (на волтаж и размер) на старите. Ако вървят в комплект по 2 батерии, трябва да замените и двете – не смесвайте стара и нова батерия.

16.12 Избягвайте да поставяте батериите на обратно в продукта. Внимавайте с обозначените места на + и – на продукта.


16.13 Премахнете батериите ако не използвате продукта в период от 30+ дни. Могат да потекат и да повредят продукта.

16.14 Ако имате изтощена батерия я сменете колкото се може по-скоро, тъй като те имат по голяма вероятност да потекат и да повредят продукта.


16.15 Не съхранявайте продукта или батериите предназначени за него на места с висока температура.

# ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАСТРОЙКА

Какво е включено:

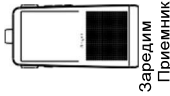


Заредим Приемник

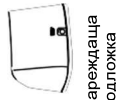


Зареждаща подложка




Щипка за колан

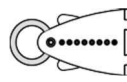

предавател

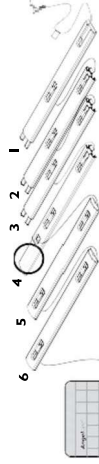

1 Сензорна подложка (AC701) или 2 Сензорни подложки(AC701-2SP) с поставени предпазители на кабелите

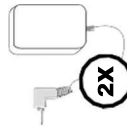

2 AC Адаптера



2 AAA Презаредими Батерии За приемника


Дигитален бебешки монитор със звук и движение

Модел AC701


## СТЪПКА 1 – ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИКА (15 ЧАСА)

### Внимание

Никога не ползвайте обикновени алкални батерии в приемника! Може да се взривят.

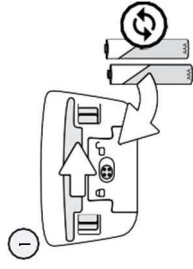

1) Премахнете капачето на батериите и поставете презаредимите батерии, включени в комплекта

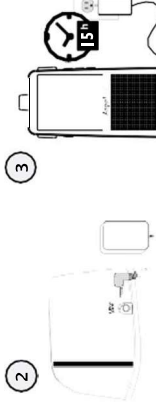

2) Свържете AC адаптера към уреда при родителя и към контакта


3) Заредете уреда за 15 последователни часа (преди първата употреба)

### ВАЖНО:


За да постигнете оптимален живот на батериите моля прочетете секцията за батерии в началото на упътването.

### ТРЯБВА ДА ПОДГОТВИТЕ:

Твърда дъска –не е включена  
Дебелина: 6 мм  
Минимални размери:  
33 см x 33 см  
Максимални размери:  
Размерите на матрака

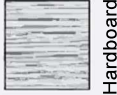

Hardboard

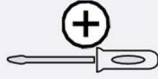


Малка Кръстачка Отвертка




2 AA Алкални Батерии За приемника

### КАКВО ЩЕ ВИ ТРЯБВА (НЕ Е ВКЛЮЧЕНО):

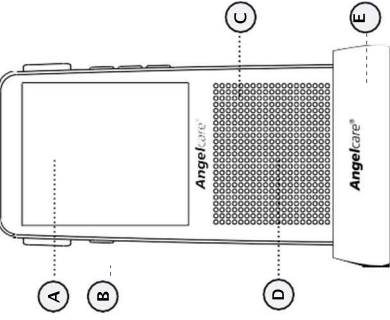

Предна страна

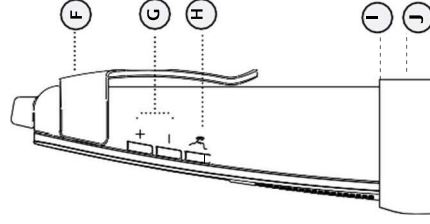


Дясна страна

ПРИЕМНИКА:

- A) LCD Дисплей
- B) Бутон за вкл/изкл
- C) Микрофон
- D) Говорител
- E) Подложка за зареждане
- F) Щипка за колан
- G) Бутони за звук
- H) Бутон за микрофон
- I) Капаче на батериите
- J) AC Адаптер жак


### Детската стая:

**ВАЖНО**  
Поставете леглото в близост до стена и далеч от въздушни течения.  
Инсталирайте Предавателя върху плоска, здрава основа на разстояние поне 1 метър от леглото.  
Включете уреда в най-близкия лесно достижим контакт.

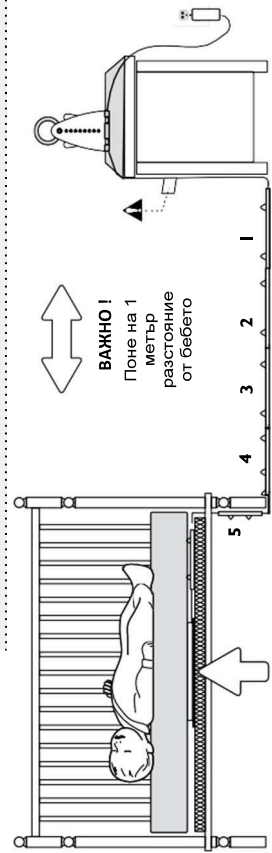

**ВАЖНО!**  
Поне на 1 метър разстояние от Бебето

Сензорна подложка

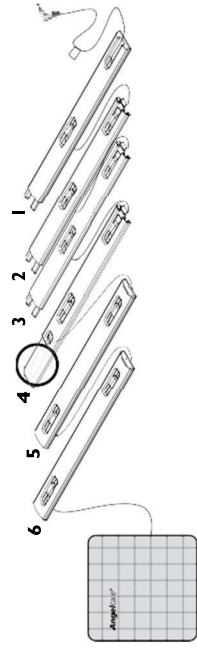

Сензорна подложка с поставени  
предпазители на кабелите

- Предпазители 1, 2, 3, 4:  
Поставят се на земя
- Предпазител 4: Има  
двойно лепящо тиксо,  
за да се постави под  
крака на леглото
- Предпазител 5:  
Поставя се  
вертикално между  
матрака и земята

Предпазител 6:  
Поставяте  
под матрака




## ВНАМАНИЕ

### ОПАСНОСТ ОТ УДУШАВАНЕ.

- Деца са се удушавали на кабелите.
- Пазете кабелите далеч от деца (на повече от 1 метър).
  - Поради риск от удушаване, родителите никога не трябва да поставят Предавателя на по-малко от 1 метър от леглото.
  - **НИКОГА** не ползвайте Сензорната подложка без предпазителите за кабели. Прекратете употреба ако предпазителите са повредени или разместени.
  - **НЕ ПОЛЗВАЙТЕ** удължители за АС адаптера. Използвайте само АС адаптера, който ви е предоставен. Не позволявайте на деца да си играят с него.


### 2.1 – ИЗБЕРЕТЕ МЯСТО ЗА ПРЕДАВАТЕЛЯ

Изберете място за предавателя на поне 1 метър от леглото на детето.

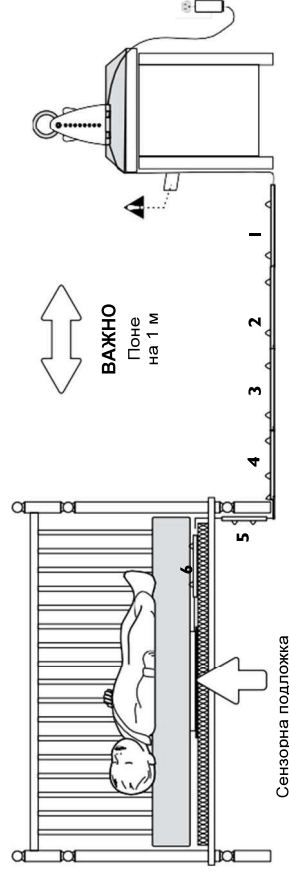


Сензорна подложка

### 2.2 ИЗБЕРЕТЕ КРАКА НА ЛЕГЛОТО, ПОД КОЙТО ЩЕ МИНАВА КАБЕЛА

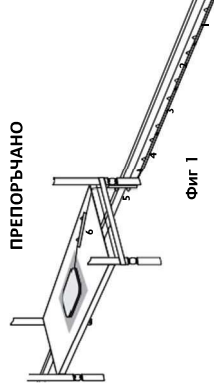

Фиг 1


ИЛИ

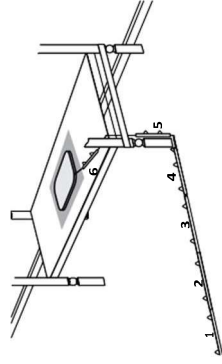


Фиг 2

- 1) Използвайте крака, който е най-близо до предавателя по стена (Фиг 1). Ако предавателя не е успоредно на леглото по стената изберете най-близкия крак (Фиг 2). Препоръчано е кабела да върви покрай стена.


### 2.3 – ПОСТАВЕТЕ СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА НА ПОДМАТРАЧНАТА РАМКА

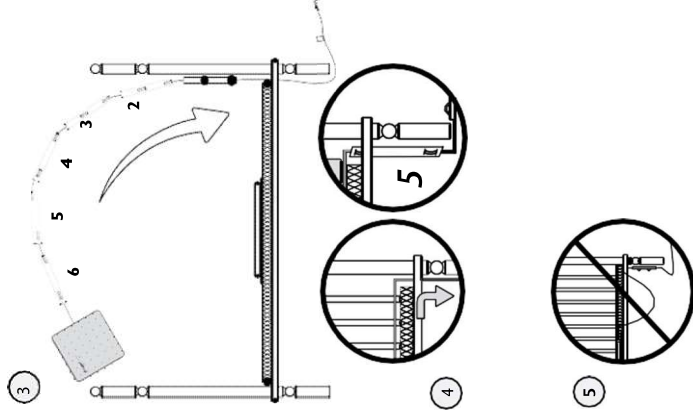


- 1) Премахнете матрака от леглото.
- 2) Поставете сензорната подложка, с лицето нагоре, в центъра на леглото.
- 3) Прекорайте кабела заедно с първите 5 предпазителя по задната част на крака на леглото – между подматрачната рамка и вътрешната част на леглото.
- 4) Прекорайте първите 4 предпазителя по земята, а 5тия предпазител трябва да застане вертикално по задната част на крака на леглото.
- 5) Подсигурете се, че няма нагънати части на кабела.

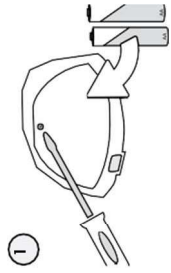


- 1) Премахнете капачето на батериите и Поставете 2 AAA алкални батерии
- 2) Поставете предавателя на минимум 1 метър от леглото
- 3) Свържете АС адаптера с предавателя и го включете в контакта.

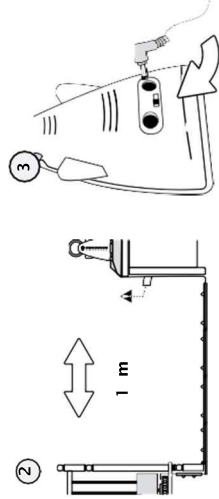

Батериите поддържат уреда да работи, в случай че тока прекъсне.

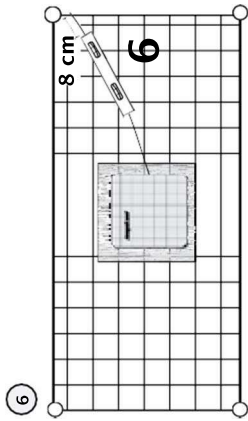


- 6) Поставете 6-тия предпазител на около 8cm от ръба на подматрачната рамка.

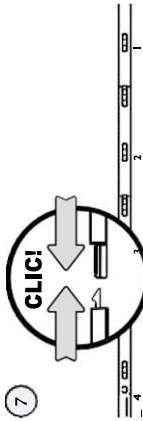

- 7) Свържете предпазителите, които са по земята
- 8) Подсигурете се, че няма нагънати кабели.


- 9) Отпелете двойното лепящо на 4-тия предпазител и го поставете под крака на леглото.

- 10) Поставете предавателя на плоска и стабилна повърхност, гледайки към леглото, на поне 1 метър и включете сензорната подложка към предавателя.

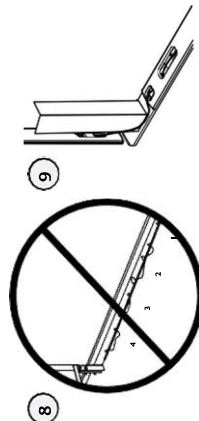

- 11) Проверете дали сензорната подложка не се е разместила

- 12) Поставете матрака обратно в леглото

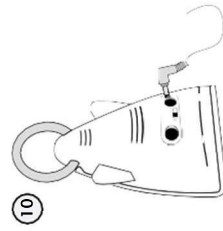

- Сензорната подложка работи с всички размери и видове матраци освен матрак с мемъри-пяна.

- Твърдата дъска, помага на сензорната подложка да засича дали детето е в леглото, дори когато то е на ръба.



## ВНИМАНИЕ

### ОПАСНОСТ ОТ УДУШАВАНЕ

- Премахнете всякакво нагъване на кабела
- Когато сваляте дъното на матрака, при растеж на детето, се подсигурете, че предпазител 5 е все още във вертикална позиция, за да не се закрака на леглото.
- Наместете сензорната подложка. Премахнете нагъване на кабела.

- Сензорната подложка не е предназначена за ползване от възрастни или деца по големи от 24 месеца.

- Прекратете употребата на сензорната подложка, когато детето Ви стане на 2 години.
- ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА – Тествайте дали сте поставили всичко правилно.

ПРЕДАВАТЕЛЯ: - ВИЖТЕ СХЕМАТА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА

.....

A) Нощна лампа

B) Бутон за локализация

C) Бутон за (Ляво Криво)

D) Нощна лампа (Дясно Криво)

E) Индикатор за батерия (зелено) за ниска батерия (червено) И за изчакване (зелено) (присвояка)

F) Индикатор за движение (зелено) и за аларма (червено)

G) Микрофон

H) Говорител


I) Жак за Сензорна подложка

J) Жак за АС адаптер


K) Копче за връзка Режим 1 - Стандартен Режим 2 – Само движение

L) Капаче на батериите

**NURSERY UNIT:**  
.....

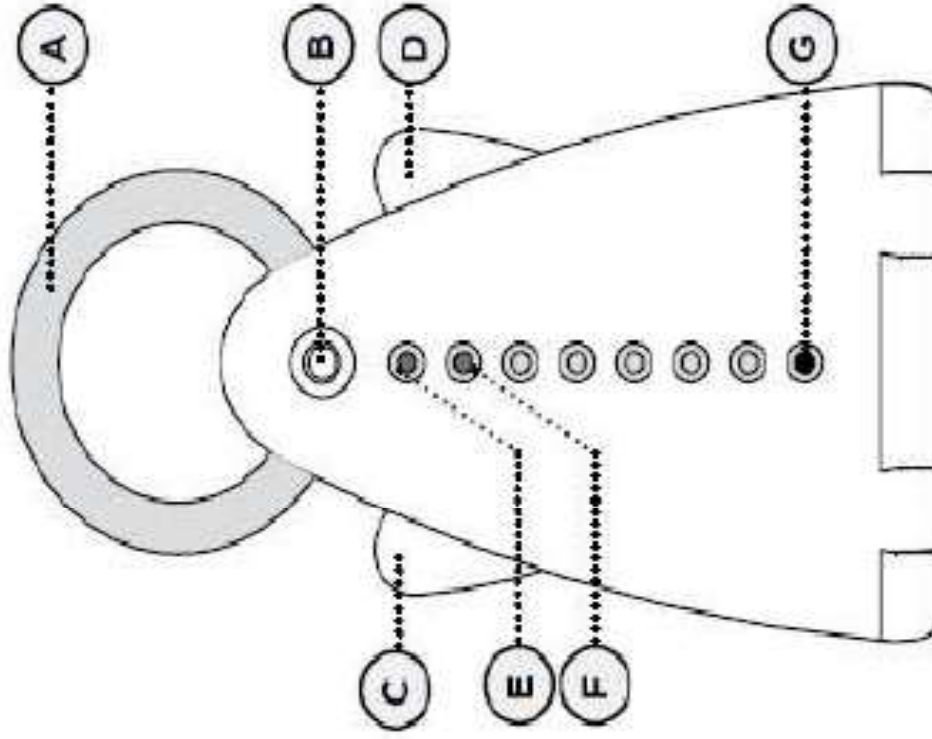


ПРЕДНА СТРАНА

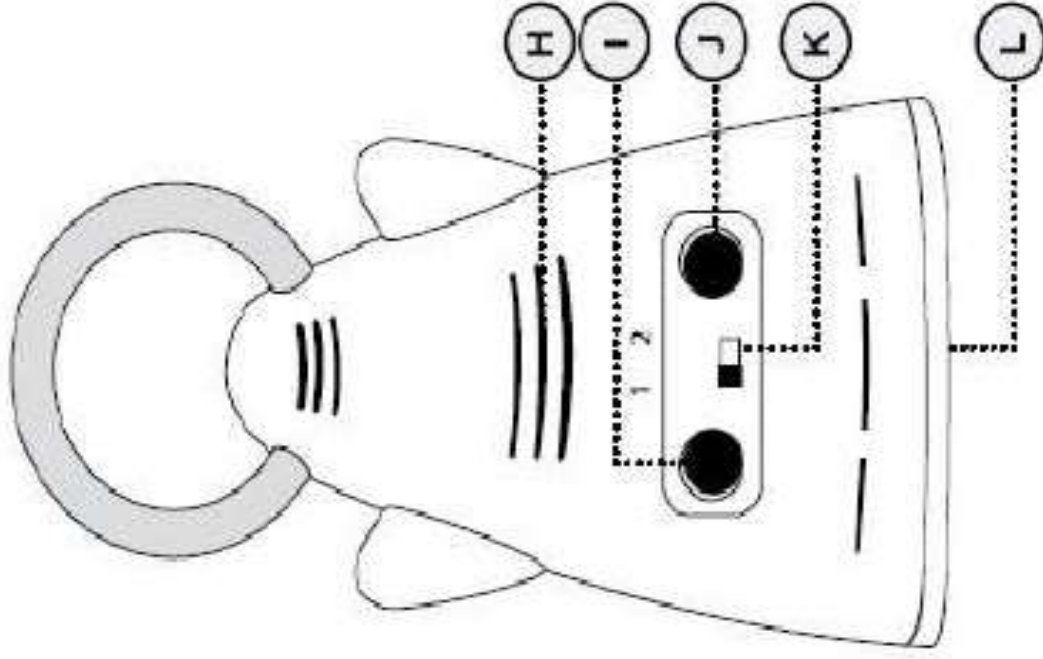

ЗАДНА СТРАНА


## СТЪПКА 4 – ВКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

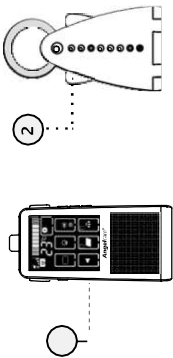


1) Натиснете бутон за включване на приемника за да влезете в „нормален режим“.

2) Натиснете лявото крило на предавателя за 2 сек

- LCD екрана има 30 сек. Да влезе в режим пестене на батерия (по тъмен екран)
- Натиснете някой бутон

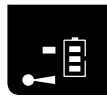

• Когато приемника е включен, а предавателя изключен, приемника ще търси за връзка. Иконките, които ще излязат на екрана са както е показано отдолу.

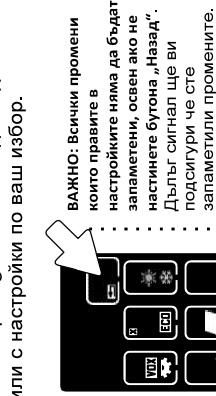

**ВАЖНО:** Всички промени които правите в настройките няма да бъдат запазени, освен ако не натиснете бутон „Назад“. Дълъг сигнал ще ви подсигури че сте запазили промените.

### ВАЖНО


Когато сте в режим настройки, връзката за звук между предавателя и приемника ще бъде временно спряна. Само алармата за движение ще бъде активна (ако сте я активирали преди това)

## СТЪПКА 5 – ТЕСТВАНЕ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Монитор Angelsage може да бъде ползван с фабричните настройки или с настройки по ваш избор.

### 5.1 – СЕНЗОРНА ПОДЛОЖКА

#### ЗА ДА АКТИВИРАТЕ СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА:

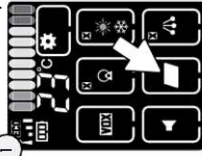


1) Натиснете иконата на Сензорната подложка, за да изкл/вкл сензори за ДВИЖЕНИЕ.



• Когато режима за движение е Изключен, функцията ТИЖ също ще бъде изключена. Така само ще можете да чувате детето Ви

#### ЗА ДА ТЕСТВАТЕ СЕНЗОРНАТА ПОДЛОЖКА

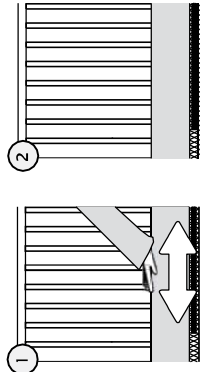

1) Плъзнете нежно ръката си по матрака.

2) RМахнете ръката си. След 15 сек. Ще чуете звук ТИЖ и след още 5 ще се активира алармата за движение

3) Повторете движението на ръката и за четирите ъгли. Подсигурете се че индикатора за Движение присветва на предавателя.

#### АЛАРМА ЗА ДВИЖЕНИЕ

- Алармата се активира ако не е засечено движение за 20 сек.
- И двете устройства ще издадът силен звук.
- Иконата за Аларма за движение ще присветне на LCD екрана.



#### АКО АЛАРМАТА НЕ СЕ АКТИВИРА

- Избягвайте контакт с леглото, когато сензорната подложка е активирана.
- Поставете леглото до стена.
- Нагласете нивото на чувствителност на сензорната подложка.

#### ВАЖНИ ИКОНИ

Показател на температура:

Показва стайната температура

НИВО НА БАТЕРИЯТА:

Indicates battery level

Празна

1/3

2/3

Пълна

#### НАСТРОЙКИ: Меню за настройки

VOX: Означава че Vox

функцията е включена

(Гласово активиране)

ECO: Означава че ECO

функцията е включена

АЛАРМА ЗА ТЕМПЕРАТУРА: Означава

че алармата за температура е

активирана

ЗВУК: Означава че звука е

включен

Сензорна подложка: Сензорит за

движение са включени

Махало: Означава че 'TIC'

функцията е включена

Ниво на звук: Обозначава

нивото на звук на

предавателя.

НИВО НА ВРЪЗКА: Показва нивото

на връзка между двете

устройства.

Отлична връзка


Добра връзка

Лоша връзка

Извън обхват



**ЗА ДА СПРЕТЕ АЛАРМАТА**

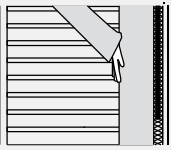


**ИЛИ**

Натиснете някой бутон на приемника (стълпка 6.5)



**ИЛИ**


Натиснете бутоната на предавателя (стълпка 6.5)

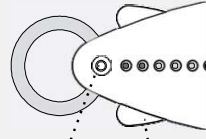


Поставете ръката си обратно на матрака

Задържете лявото крило за две секунди за да изключите предавателя

**ЗА ДА НАГЛАСИТЕ НИВОТО НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ:**

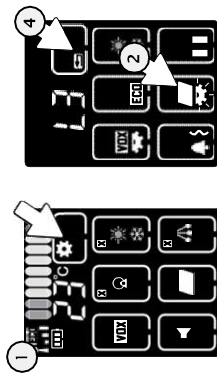


- Ниво 1
- Ниво 2
- Ниво 3
- Ниво 4
- Ниво 5

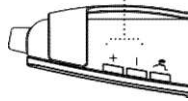

**ЗА ДА АКТИВИРАТЕ ФУНКЦИЯТА ТИК:**

Ще се чуват ТИК звуци при движение на детето Ви (когато сензора за движение е включен)

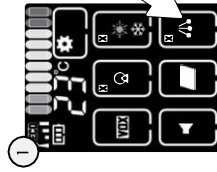

**ВАЖНО:**

Когато сензора за движение е изключен, функцията ТИК е автоматично изключена.



1) Натиснете иконката ТИК за да вкл/изкл 'ТИК' функцията.

• Ако функцията е вкл. Ще чувате регулярно звук ТИК от приемника.

• Когато сте в режим ЕКО, функцията ТИК е изключена.

**ВАЖНО**

- Сензорната подложка не е пригодена за ползване от деца по големи от 24 месеца.
- Когато привършите с употребата на сензорната подложка, моля Премахнете я от леглото и я съхранете за бъдеща полза.


**52 - ЗВУК**

**НАГЛАСЯНЕ НА ЗВУКА:**


Натиснете + или - за да регулирате звука.

**ВАЖНО:**

Когато сте на ниво LO ионата за звука ще пресветка на екрана, и ако я натиснете отново ще активира режим „Без звук“. Иконата ще изчезне и ще се появи кръст. За да изключите натиснете отново иконата.(Вижте 6.6).

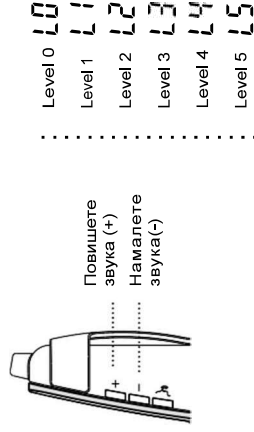


**НАМАЛЯНЕ НА ЗВУКА ДО LO**

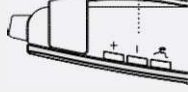

Натиснете - докато не стигнете до LO (стълпка 6.6)

**РЕЖИМ ГОВОР**

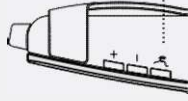

Натиснете и задръжте този бутон за да говорите.

**ПРОБА НА ЗВУКА:**

Помолете някой да говори през

Предавателя за да се подсигурите че има звук.

**ВАЖНО**

За да избегнете микрофония, трябва да има поне 3 метра разстояние между устройствата

**АКО НЕ ЧУВАТЕ ЗВУК:**

- Проверете дали устройствата са включени.
- Проверете дали устройствата са включени в работещ контакт.
- Проверете батериите в устройствата. Сменете ги ако е нужно).
- Доближете приемника до предавателя

**53 - БАТЕРИИ**

**КАК ДА ПРОВЕРИТЕ НИВОТО НА БАТЕРИИТЕ:**

Изключете АС адаптера от устройствата.

- Ако не светне зелена светлина на предавателя, сменете батериите.
- Ако екрана на приемника не светне, сменете батериите.

**КАК ДА ЗАРЕДИТЕ БАТЕРИИТЕ НА ПРИЕМНИКА:**

Оставете приемника на зареждащата подложка за да заредите батериите. Въпреки че приемника работи добре на 1/3 заредени батерии, препоръчваме да ги зареждате на пълно.



**АЛАРМА ЗА БАТЕРИЯТА НА ПРИЕМНИКА**

- Алармата се активира ако батериите свършат.
- Приемника ще писука всеки 20 сек.
- Иконата за празна батерия ще свети на екрана.






## 61. — ГЛАСОВО АКТИВИРАНЕ (VOX) ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЗВУКОВ РЕЖИМ

Нагласете какви звуци да прихваща предавателя:

VOX (прихваща звуци в зависимост от нивото на чувствителност) или Продължителен (прихваща всички звуци).

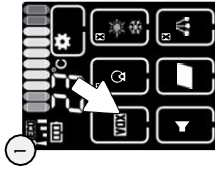

- 1) Натиснете VOX иконата за да вкл/изкл функцията.





### NOTE:

Когато VOX е изключено, Продължителен режим е включен.

## НАГЛАСЯНЕ VOX ЧУВСТВИТЕЛНОСТ:

Нагласете нивото на звук, което да бъде прехванато от предавателя.

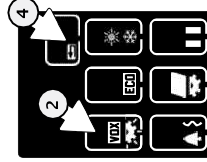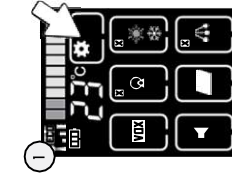

- 1) Влезте в режим Настройки.
- 2) Натиснете VOX иконата.


... ще присветка.

- 3) Използвайте + и — от дясната част на приемника за да нагласите нивото на чувствителност (от 1 До 4)

### ИЛИ

Натиснете VOX иконата за да изберете ниво.

- Level 1
- Level 2
- Level 3
- Level 4

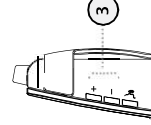

- 4) Натиснете бутон Назад, за да запазите промените.


### ВАЖНО:

Когато сте в режим ЕКО, VOX режима ще е автоматично включен.


## 62. — РЕЖИМ ЕКО

Позволява за по-ниска консумация на ток и батерии.


ЗА ДА ВКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ ЕКО:

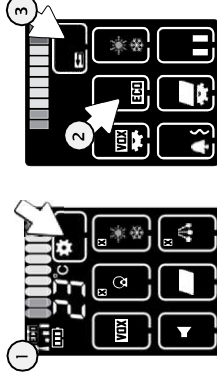

- 1) Влезте в режим Настройки
- 2) Натиснете ЕКО иконата за да вкл/изкл режим ЕКО.

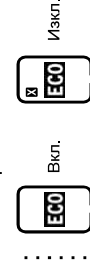

- 3) Натиснете бутон Назад, за да запазите промените.


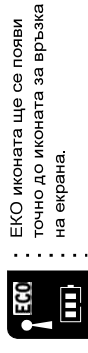


ЕКО иконата ще се появи  
точно до иконата за връзка  
на екрана.


**ВАЖНО:** В режим ЕКО връзката е силно ограничена. Функцията VOX е автоматично включена, а ТИК-изключена. Алармите за Звук, Температура и Движение запазват настройките си.

## 63. — ЕДИНИЦА НА ТЕМПЕРАТУРА


ЗА ДА СМЕНИТЕ ИЗМЕРВАЩАТА ЕДИНИЦА:

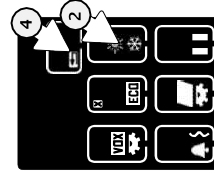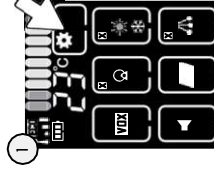

- 1) Влезте в режим Настройки.
- 2) Натиснете иконата за настройки на температурата.
- 3) Натиснете бутон за разговор на приемника.

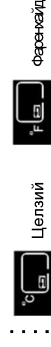


- 4) Натиснете бутон Назад, за да запазите промените.

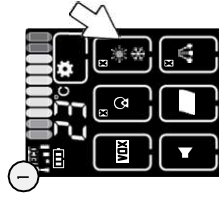ЗА ДА АКТИВИРАТЕ АЛАРМАТА ЗА  
ТЕМПЕРАТУРА:


- 1) Натиснете иконата за температура, за да активирате алармата за ниска/висока температура.



## СТОЙНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРА:

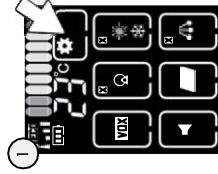

- 1) Влезте в режим Настройки.
- 2) Натиснете иконата за Температура.
- 3) Икона за **Висока температура** (слънце) ще присветка. Нагласете чрез (+) или (-) (22 до 35 °C).
- 4) Натиснете отново иконата за температура.
- 5) Икона за **Ниска температура** (Снежинка) ще присветка, Нагласете чрез (+) или (-) (5 до 19 °C).
- 6) Натиснете бутона Назад, за да запазите промените

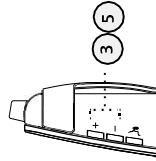


- Висока Температура
- Ниска Температура

## АЛАРМА ЗА ТЕМПЕРАТУРА

- Алармата се активира, когато стигне зададените ниска или висока температура.
- Приемника ще изписува 3 последователни пъти и/или ще вибрира на всеки 5 сек, в зависимост от зададената аларма.
- Иконата за аларма за температура ще присветка на LCD дисплея заедно с иконите за Ниска/Висока температура.



## Изберете вид на алармата на Приемника.

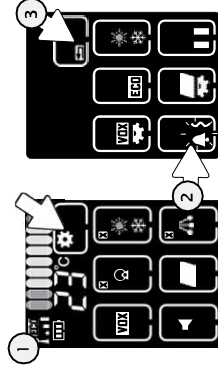

- 1) Влезте в режим Настройки.
- 2) Натиснете иконата за аларма 2 пъти, и изберете режим.
- 3) Натиснете бутона Назад, за да запазите промените.

- Звук и Вибрация
- Само Звук

## Само Вибрация:

Когато се задейства алармата за движение, приемника ще е на вибрация, а предавателя на звук.

## ВАЖНО

Когато сте в режим настройки, връзката за звук и аларма между предавателя и приемника ще бъде временно спряна. Само алармата за движение ще бъде активна (ако сте я активирали преди това)

## 65 - РЕЖИМ ИЗЧАКВАНЕ


## Позволява ви да поставите монитора в режим Изчакване



- 1) Влезте в режим Настройки.
- 2) Натиснете иконата за Изчакване Или Натиснете бутона за Изчакване на предавателя за 4 сек.
- 3) Натиснете иконата за Изчакване или бутона на предавателя за 4 сек, за да премахнете промените.

## NOTE:

В режим Изчакване, Светлинката на Предавателя ще присветка, и аларма ще звучи/вибрира от приемника всеки 20 сек, в зависимост от избраната аларма.

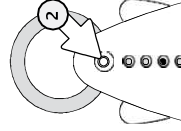

## ВАЖНО

Когато монитора е в режим Изчакване, функцията и алармата за движение ще е изключена.

## 66 – БЕЗ ЗВУК


Позволява ви да включите режим Без Звук.

### АКТИВИРАНЕ:

Натиснете иконата за звук.

### ДЕАКТИВИРАНЕ:

Натиснете иконата за звук.

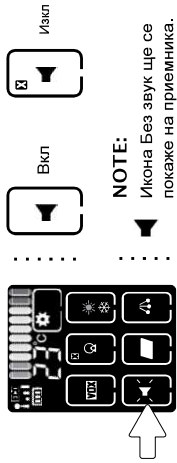

### NOTE:

Икона Без звук ще се покаже на приемника.



## 67 – НОЩНА СВЕТЛИНКА


Позволява да ползвате монитора като нощна светлина.

### АКТИВИРАНЕ:

Натиснете дясното крило на предавателя или иконата за Нощна светилна на приемника за да изберете сила на светлината.

### ВАЖНО:

нощна светлина ще е деактивирана ако предавателя е на батерии.

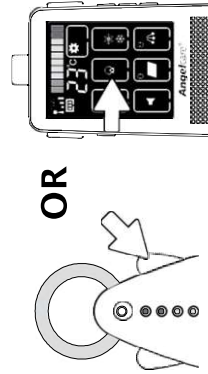



## 68 – ЛОКАЦИЯ

Помага да намерите Приемника.

### ЗА ДА НАМЕРИТЕ ПРИЕМНИКА:

Натиснете и пуснете бутон за локализация на предавателя.

Приемника ще изписука.

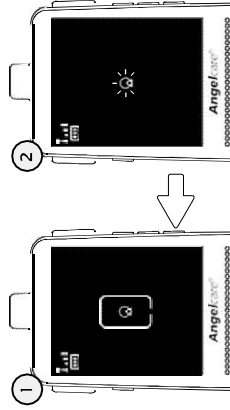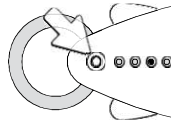

### Процедура за Свързване:

- 1) Включете Приемника и натиснете бутон за говорене за 2 секунди. Иконата на Предавателя трябва да излезе на екрана.
- 2) Натиснете иконата, приемника ще влезе в режим Свързване (иконата ще присветка).

- След 1 мин бездействие Приемника
- Ще излезе от режим свързване, и ще трябва да повторите процедурата.

- 3) Натиснете бутон за включване на Предавателя.



LCD светлинка ще присветне.

- 4) Натиснете бутон за включване 4 пъти в периода на 30 сек. LCD светлина ще присветне и процедурата ще завърши след 10сек.

- 5) Когато процедурата е завършена H1 или H2 ще се покаже на екрана на приемника. След това ще се включи нормално меню.

### ВАЖНО:

- Тази процедура връща фабричните настройки и на двете устройства.

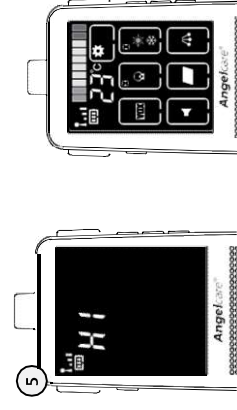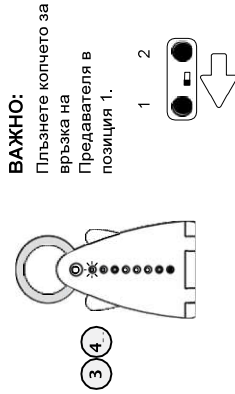


### ЗА ДА СПРЕТЕ ПИСУКАНЕТО НА ПРИЕМНИКА:



Натиснете някой бутон на Приемника

### ИЛИ

Натиснете отново бутон на Предавателя

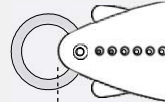

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

### ГРИЖА ЗА ПРЕЗАРДИМИТЕ БАТЕРИИ

- Заредете батериите за 15 часа преди първа употреба.
- За да поддържате максимален живот на батериите, е препоръчително периодично да ги изтощавате докрай. Не оставяйте батериите да се зареждат постоянно на зареждащата платформа. Ако приемника не е в употреба, моля изключете го.
- Ако не сте доволни как работи Приемника е възможно да повлияят от батериите. Моля сменете презаредимите батерии(2 x NiMH).
- Препоръчителна е смяна на батериите всеки 6 месеца.

### ЛИПСА НА ВРЪЗКА

В случай на липса на връзка, доближете Предавателя и Приемника по близо един до друг и се уверете, че двете устройства са включени. Ако все още няма връзка, и индикатор Извън Обхват не свети, тогава и само тогава, изпълнете долупосочената процедура.

## ФЛАШИВА АЛАРМА

- Изключете Предавателя
- Проверете връзката на Сензорната подложка и Предавателя. Махнете и сложете отново кабела.
- Уверете се, че няма нищо между матрака и Сензорната подложка.
- Ако леглото има пружина или мека основа, поставете твърда дъска между основата на леглото и Сензорната подложка, която да е поне 33 x 33 см и 6 мм дебела.
- Уверете се, че сте поставили Сензорната подложка, както е показано в ръководника. Може да се наложи да регулирате нивата на чувствителност, както е показано в стъпка 5.1.

## ЛИПСА НА АЛАРМА

- Избягвайте контакт с леглото когато монитора работи.
- Поставете леглото до стена, за да предотвратите Сензорната подложка да засича движения извън леглото.
- Може да се наложи да намалите нивото на чувствителност. Вижте стъпка 5.1.
- Изключете всичко около леглото, което може да предизвиква вибрации.

## ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗВУК

- Уверете се че и двете устройства са включени.
- Уверете се че и двете устройства имат достъп на ток или чрез AC адаптера или батерии. Може да се наложи да пробвате с друг контакт.
- Вижте екрана на приемника дали не е в режим Без Звук. Вижте стъпка 6.6.увеличете звука, ако е необходимо.
- Доближете предавателя и приемника.

## ИНДИКАТОРА, ЧЕ ПРЕДАВАТЕЛЯ Е ВКЛЮЧЕН (ЗЕЛЕНА СВЕТИЛНА) НЕ СВЕТИ

- Проверете връзката или сменете контакта.
- Натиснете лявото крило на Предавателя за 2 сек за да го включите.

## СЛАБА ВРЪЗКА

- Доближете двете устройства.
- Сменете мястото на едно, или на двете устройства.
- Поставете монитора на твърда повърхност, далеч от досега на деца.
- Сменете батериите или заредете Приемника.

## КРИВЕНЕ НА ЗВУКА ИЛИ СМУЩЕНИЯ (ОТ ДРУГИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ, РАДИО, УОКИ-ТОКИ, ИЛИ ТЕЛЕФОН)

- Завъртете приемника или го преместете.

## МИКРОФОНИЯ (ОТ ПРИЕМНИКА)

- Отдалечете двете устройства (на поне 3 метра).
- Намалете звука на Приемника.

## ЕКРАНА НА ПРИЕМНИКА Е ЧЕРЕН (ПРИЕМНИКА Е ИЗКЛЮЧЕН)

- Включете Приемника като натиснете бутона за включване.
- Сменете батериите или заредете Приемника.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### They may only be replaced by 2 AAA NIMH rechargeable batteries.

#### Batteries:

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (NI-CD, NIMH, etc) batteries.

#### Transmission:

Data transmission between the Parent Unit and Nursery Unit is made on a frequency between 1880 and 1920 MHz (the exact frequency band varies among countries).

Hereby, Angelcare Monitors Inc, declares this baby monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The EU declaration of conformity can be obtained through your local distributor. Please refer to address in the manual.

#### Range:

Open field: up to 250 m

#### Power Supply:

2 AA Alkaline batteries (not included) or 100-240VAC/5VDC Adapter for Nursery Unit.

2 AAA rechargeable batteries and 100-240VAC/5VDC AC adapter for Charging Base for the Parent Unit.

**Caution:** To reduce the risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. The included Batteries are 2 AAA NIMH rechargeable batteries, manufactured by GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) or by HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAA-J600, 1.2V 600mAh).